

Clorocide

Desinfetante hospitalar para superfícies fixas.
Cloro orgânico

- **Limpeza e desinfecção simultâneas**
Clorocide associa cloro com tensoativos, ou seja, realiza os procedimentos de limpeza e desinfecção em uma só operação.
- **Econômico**
Substitui 2 produtos - hipoclorito e detergente - trazendo redução de custos na operação de limpeza e desinfecção de pisos e superfícies.
- **Baixa toxicidade ao usuário**
Sua formulação balanceada, atua de maneira eficiente em baixas concentrações (solução a 3% apresenta 540 ppm de cloro ativo).
- **Prático e mais seguro**
Proporciona segurança e praticidade aos procedimentos de descontaminação de fluidos em pisos e superfícies por:
 - Maior facilidade na aplicação;
 - Maior segurança no recolhimento dos resíduos após o tempo de contato;
 - Simplificação no procedimento (em função do aplicador que acompanha o Clorocide);
 - Não produz névoa, impedindo qualquer tipo de irritação.
- **Alta estabilidade**
O princípio ativo empregado em sua formulação - cloro orgânico - garante uma maior estabilidade (1 ano) comparado com produtos à base de hipoclorito de sódio.

Utilização


Clorocide destina-se à limpeza e desinfecção simultâneas de superfícies fixas em áreas hospitalares. Clorocide pode ainda ser usado para absorver sangue e demais fluidos corpóreos derramados em superfícies fixas.

Modo de usar

Limpeza e desinfecção de superfícies fixas: Preparar Clorocide na concentração de 3,0% (300 g para 10 litros de água correspondendo a 540 ppm de cloro ativo). Aplicar a solução com esponjas, escovas, mops e outros. Deixar em contato com a superfície durante 10 minutos. Em seguida enxaguar e deixar secar. **Absorção de sangue e demais fluidos corpóreos:** Espalhar Clorocide sobre o sangue e/ou fluidos corpóreos derramados na superfície. Após 10 minutos de contato, recolher os resíduos com auxílio de uma pá. Em seguida, fazer a limpeza e desinfecção conforme instruções acima.

Cuidados de conservação

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada, longe de produtos ácidos e em ambiente coberto, seco e dotado de boa ventilação. Deve ainda ser armazenado afastado da luz solar direta, de fontes de calor e materiais incompatíveis. Vide Ficha de Segurança do Produto. **NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS, A MENOS QUE TAL PROCEDIMENTO SEJA INDICADO PELO FABRICANTE POR ESCRITO.**

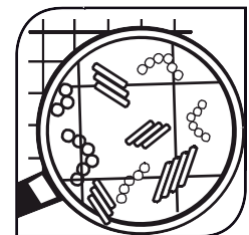

Clorocide

Desinfetante hospitalar para superfícies fixas.

Cloro orgânico

Informações técnicas

Características físico-químicas

Aspecto	Pó
Cor	Branca
Alcalinidade total em (Na ₂ O)	18,5 - 20,5%

(Os dados acima são típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como especificações do produto.)

Composição

Dicloroisocianurato de Sódio, Alcalinizante, Coadjuvantes, Dispersante, Sequestrante e Tensoativo Aniônico.

PRÍNCIPIO ATIVO: Dicloroisocianurato de Sódio - Teor de Cloro Ativo 1,8 % mín.

Precauções de uso

CORROSIVO! CAUSA QUEIMADURAS GRAVES AOS OLHOS, MUCOSAS E PELE. VENENO: FATAL SE INGERIDO, INALADO OU ABSORVIDO PELA PELE. CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Em caso de contato com ácidos, este produto libera calor e gases. Não misturar com produtos a base de amoníaco. Impeça o contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio. Para o manuseio do produto e de suas soluções, use luvas, avental, botas, máscara e óculos de segurança. Em caso de contato com os olhos, lave-os imediatamente com água corrente durante 15 minutos. Em caso de contato com a pele, remova as roupas contaminadas e lave as partes atingidas com água em abundância durante 15 minutos. Em caso de inalação ou aspiração, remova a pessoa para local arejado. Em caso de ingestão acidental, não provoque vômitos e consulte o Centro de Intoxicações ou o Serviço de Saúde mais próximo. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Em todos os casos, procure imediatamente um médico, levando consigo a embalagem ou o rótulo do produto. Caso necessite de informações adicionais, entre em contato com o Centro Toxicológico pelos telefones (0__11) 5012-5311 ou 0800-77 13 733. Mantenha o produto em sua embalagem original. Nunca reutilize as embalagens vazias. Lave os objetos ou utensílios usados como medida antes de reutilizá-los. Não aplique em superfície aquecida. Não misture com água na embalagem original.

Embalagem

Balde de polietileno com 5kg.

REGISTRO NO M.S.: 3.2661.0155